

# L-Mesitran Ointment

## Mast na hojení ran

L-Mesitran Ointment obsahuje: 48 % lékařského medu, lékařský hypoalergenní lanolin (Medilan®), slunečnicový olej, olej z tresčích jater, měsíček lékařský (*Calendula officinalis*), Aloe pravou (*Aloe barbadensis*), vitamíny C a E a oxid zinečnatý.

Když je L-Mesitran v kontaktu s ránou, dochází ke stahování tekutin z okolních tkání, takže vzniká vlhké prostředí napomáhající hojení ran. To podporuje proces hojení usnadněním autolýzy nekrotického a devitalizovaného materiálu, napomáhá přípravě spodiny rány a podporuje epitelizaci.

L-Mesitran:

- má antibakteriální vlastnosti,
- působí postupně a je možné ho snadno odstranit podle místního postupu čištění ran,
- zabraňuje přilepení sekundárního obkladu ke spodině rány.

Vzhledem k použití přírodních přísad mohou jednotlivé šarže mít různé barvy (žlutou-hnědou), různou viskozitu a mohou obsahovat viditelné krystaly cukru. Tyto odlišnosti nemají vliv na účinnost a použití produktu.

## Indikace:

Povrchové a akutní rány, např. řezné rány, odřeniny a místa transplantace. Popáleniny prvního a druhého stupně. Chronické rány, např. proleženiny, bérčové, arteriální a diabetické vředy. Maligní rány (podpora dezodorizace a vyčištění). Kolonizované akutní rány a (pooperační) chirurgické rány.

## Kontraindikace a omezení

Zatím nejsou známy žádné kontraindikace. Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou citliví na produkt nebo některou z jeho složek.

## Preventivní opatření a komentáře

1. Ohledně postupu ošetřování ran se vždy poradte s lékařem.
2. Nepoužívejte nové produkty, které jsou poškozené, nebo uplynula jejich doba použitelnosti.
3. Ránu prohlédněte a vyčistěte podle místního postupu.
4. Po první výměně obkladu se může rána jevit větší kvůli autolytickému debridementu. Tento jev je běžný a dochází k němu proto, že se odstraňuje devitalizovaná tkáň a spodina rány se připravuje na hojení.
5. V případě nesnášenlivosti produktu L-Mesitran nebo některé z jeho složek ho vhodnou technikou odstraňte a místo důkladně očistěte.
6. L-Mesitran je určen k použití pro jednoho pacienta, opětovně ho může použít jen tentýž pacient.
7. Po použití vždy znovu uzavřete obal produktu.
8. Po otevření produkt spotřebujte do tří měsíců.
9. Produkt zlikvidujte podle místních předpisů.

## Pokyny k použití

A. Tuba: 1. Sundejte víčko, ústí tuby a vrchní část víčka očistěte alkoholovým tamponem. 2. Vrškem víčka zatlačte do ochranné fólie zakrývající hubici, teď tubu nevymačkávejte. B. Sklenička: odstraňte ochrannou fólii a víčko. *Aplikace na ránu:* 1. Sterilní špachtlí naneste tenkou vrstvu L-Mesitranu buď přímo na místo rány a okolní tkáň nebo nejdřív na sterilní gázu. 2. Zakryjte a zafixujte vhodným sekundárním obkladem, podle množství tekutiny vytékající z rány. 3. Ránu a okolní tkáň pravidelně kontrolujte tak, jak to vyžaduje místní postup.

## Jak často aplikovat

Záleží na množství exsudátu a potřebách rány. Produkt znovu aplikujte, až se vstřebá ( $\pm$  každých 24-48 hodin).

## Skladovací pokyny

Skladujte při pokojové teplotě mezi 5° C a 25° C (41°–77° F). Nevystavujte přímému slunci a vlhku. L - Mesitran je přírodní produkt a při vysokých teplotách může zkapalnět. Pokud lze tento problém očekávat, dejte ho před použitím do lednice.

Poslední revize textu: 28. 3. 2017


© Theo Manufacturing, BV, 2014

### Výrobce:

Theo Manufacturing BV, Capucijnestraat 71  
NL-6211 RP Maastricht  
P.O. Box 370, NL- 6200 AJ Maastricht  
The Netherlands  
[www.l-mesitran.com](http://www.l-mesitran.com)

### Distributor pro ČR:

LERAM pharmaceuticals s.r.o  
nám. Svobody 93/22  
602 00 Brno  
Česká Republika  
[www.leram-pharma.cz](http://www.leram-pharma.cz)

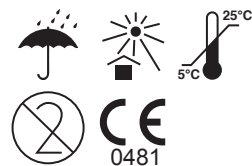

*Single patient use*

