

L-Mesitran Tulle

Popis produktu

L-Mesitran Tulle je nepřilnavý polyetylenový obklad napuštěný patentovaným gelem L-Mesitran Soft, který obsahuje: 40 % lékařského medu, lékařský hypoalergenní lanolin (Medilan®), propylenglykol, PEG 4000 a vitamíny C a E.

Když je gel v kontaktu s ránou, dochází ke stahování tekutin z okolních tkání, takže vzniká vlhké prostředí napomáhající hojení ran. Toto prostředí podporuje proces hojení usnadněním autolýzy nekrotického a devitalizovaného materiálu, napomáhá přípravě spodiny rány a podporuje migraci epitelálních buněk.

- L-Mesitran Tulle má antibakteriální vlastnosti,
- gel působí postupně a je možné ho snadno odstranit podle místního postupu čištění ran,
- L-Mesitran Tulle je primární obklad na rány, který by měl být zakrytý běžně používanými sekundárními obklady,
- vlastnosti L-Mesitran Tulle zabraňují přilepení sekundárního obkladu ke spodině rány,
- vzhledem k použití přírodních přísad mohou jednotlivé šarže mít různé barvy (žlutou-hnědou),
- gel může obsahovat viditelné krystaly cukru, toto však nemá vliv na účinnost a/nebo použití produktu
- bílý polyetylenový film umožňuje průchod exsudátu k sekundárnímu obkladu.

Indikace:

Povrchové a akutní rány, např. řezné rány, odřeniny a místa transplantace. Popáleniny prvního a druhého stupně. Chronické rány, např. proleženiny, bérčové, arteriální a diabetické vředy. Maligní rány (podpora dezodorizace a/nebo vyčištění). Kolonizované akutní rány a (poooperační) chirurgické rány.

Kontraindikace a omezení

Zatím nejsou známy žádné kontraindikace. Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou citliví na obklad nebo některou z jeho složek.

Preventivní opatření a komentáře

1. Nepoužívejte, pokud je obal porušený nebo již otevřený. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
2. Ohledně řádného postupu ošetřování ran se vždy poraďte s lékařem.
3. Před použitím ránu prohlédněte a vyčistěte podle místního postupu.
4. Po první výměně obkladu se může rána jevit větší kvůli autolytickému debridementu. Tento jev je běžný a dochází k němu proto, že se odstraňuje devitalizovaná tkáň a spodina rány se připravuje na hojení.
5. Zajistěte lékařský dohled v případě, že pacient vykazuje známky infekce (horečka, bolest), nebo pokud se stav rány zhoršuje.
6. Každý obklad L-Mesitran Tulle je pouze na jedno použití. Použitý produkt zlikvidujte podle místních předpisů.

Pokyny k použití

1. Ránu prohlédněte a v případě potřeby vyčistěte podle místního postupu.
2. Obklad L-Mesitran Tulle vyjměte z vložky a v případě potřeby upravte na požadovanou velikost.
3. Obklad odloupněte z obou papírových podkladů a přiložte na ránu.
4. Zakryjte a zafixujte vhodným sekundárním obkladem podle množství tekutiny vytékající z rány.
5. Ránu a okolní tkáň pravidelně kontrolujte, jak to vyžaduje místní postup.
6. V případě nesnášenlivosti obkladu nebo některé z jeho složek ho vhodnou technikou odstraňte a místo důkladně očistěte.

Jak často provádět výměnu

L-Mesitran Tulle může zůstat na místě několik dní, podle množství exsudátu a potřeb rány. L-Mesitran Tulle vyměňte, až se gel vsřebá. Pokud je třeba, L-Mesitran Tulle může zůstat na místě, zatímco se vymění sekundární obklad. Pokud je L-Mesitran Tulle příliš suchý, úplné a jemné odstranění obkladu může usnadnit irigace.

Skladovací pokyny

Skladujte při pokojové teplotě mezi 5° C a 25° C (41°–77° F). Nevystavujte přímému slunci a vlhku. L-Mesitran je přírodní produkt a při vysokých teplotách může gel zkapalnět. Pokud lze tento problém očekávat, dejte obklad (bez vnějšího kartonového obalu) před použitím do lednice.

Poslední revize textu: 28. 3. 2017

© Theo Manufacturing, BV, 2014

Výrobce:

Theo Manufacturing BV, Capucijnestraat 71
NL-6211 RP Maastricht
P.O. Box 370, NL- 6200 AJ Maastricht
The Netherlands
www.l-mesitran.com

Distributor pro ČR:

LERAM pharmaceuticals s.r.o
nám. Svobody 93/22
602 00 Brno
Česká Republika
www.leram-pharma.cz

