



Lanko s polyabsorpčními vlákny a sterilní sondou

FORMA

Lanko **UrgoClean**, inovativní produkt od společnosti Laboratories URGO, se dodává jako sterilní nepletené krytí z vysoce a kohezivních polyabsorpčních vláken (polyakrylát).

Tato inovace je založená na tepelném vázání k polyakrylátovým vláknům, která jsou uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, kterému lanko **UrgoClean** vděčí za své specifické vlastnosti – absorpcí, zachytávání zbytků odumřelé tkáně z rány a odolnost vůči tahu.

MECHANISMUS ÚČINKU

Při kontaktu s exsudátem rány polyabsorpční polyakrylátová vlákna gelifikují a navážou tak zbytky odumřelé tkáně – absorpcí a drenáž napomáhají jeho eliminaci (autolytický debridement).

VLASTNOSTI

- Absorpce a drenáž rezidua exudátu a bakterií z chronických ran pomáhají při debridementu.
- Absorpce a drenáž serózního exsudátu z pooperačních ran.
- K ošetřování menších krvácení.
- Odstranění celého krytí najednou díky odolnosti polyabsorpčních vláken vůči tahu.
- Bezbolestné odstraňování bez poškození rány.

INDIKACE

Lanko **UrgoClean** je indikované k použití v čistící fázi exudujících dutin a sinusových ran, chronických (vředy na dolních končetinách, prolezeniny, diabetické vředy na nohou), akutních ran (traumatických), pooperačních ran a onkologických ran.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Příprava rány:

- Vyčistěte ránu dle místního protokolu a opláchněte ji fyziologickým roztokem.
- Pokud jste předtím použili antisepikum, pečliv ránu před aplikací lanko **UrgoClean** rope opláchněte fyziologickým roztokem.
- Použití lanko **UrgoClean** nepředstavuje kontraindikaci mechanického debridementu v situacích, kdy je takový postup vhodný.

2. Aplikace krytí:

- Otevřete blistr.
- Pomocí sondy zhodnotěte v případě potřeby hloubku rány.
- Zasuňte lanko **UrgoClean** do rány minimálním tlakem.

Délku lanko **UrgoClean** lze v případě potřeby upravit pomocí sterilních nůžek (rozstříhnutím kolmo na lanko), aby odpovídala hloubce rány. U ran s nízkou exsudací může být třeba lanko **UrgoClean** před aplikací lehce navlhčit fyziologickým roztokem.

- Ujistěte se, že je lanko **UrgoClean** viditelné a že jej lze z dutiny rány jednoduše vytáhnout
- Přes lanko **UrgoClean** naneste sekundární krytí vhodné pro lokalizaci rány a míru exsudace.

3. Výměny krytí:

Lanko **UrgoClean** je třeba během fáze čištění rány měnit každý 1 až 2 dny, poté dle potřeb v závislosti od objemu exsudátu a klinického stavu rány. Sondu a nepoužité části lanko **UrgoClean** zlikvidujte v souladu s místními postupy.

4. Odstranění krytí:

Ujistěte se, že jste z rány vytáhl celé lanko **UrgoClean**.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Díky neokluzivnímu charakteru lze lanko **UrgoClean** za pečlivého lékařského dohledu použít u infikovaných ran.
- Během debridementu se rána může zdát byt větší. Způsobuje to kontinuální odstraňování odumřelé tkáně.
- Snažte se co nejvíce omezit použití sondy v ráně. Sonda v ráně neponechávejte.
- (*) Před použitím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal poškozený, produkt nepoužívejte.
- Neužívejte vnitřně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Lanko ani sondu neresterilizujte.
- Sterilní individuální balení obsahující jednorázovou sondu. Opakováne použití jednorázového krytí může být spojeno s rizikem infekce.

KONTRAINDIKACE

- Lanko **UrgoClean** nepoužívejte ve fistulách s menším průměrem než průměr sondy.
- Lanko **UrgoClean** nepoužívejte na suchých ránach.
- Jelikož lanko **UrgoClean** není vstřebatelné, nepoužívejte jej jako chirurgickou kompresi.
- Lanko **UrgoClean** nepoužívejte v endonazální oblasti při chirurgických zákrocích na nosu a paranasálních dutinách.
- Nepoužívejte, pokud je u pacienta prokázána přecitlivělosť na lanko **UrgoClean**.
- Lanko **UrgoClean** nepoužívejte jako chirurgický savý materiál u těžce krvácejících ran.

0459 (2011)

(2016 - 12)

STERILE R



25°C



Made in France

Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France